

Rollator Cristallo / Rubino



Gebrauchsanweisung



Produktbeschreibung

Der Rollator ist sowohl für den Innen- als auch für den Außengebrauch konzipiert. Er unterstützt den Benutzer beim Gehen im häuslichen Bereich, beim Einkaufen und auf Reisen. Ausgerüstet ist er mit einem Gepäckgestell, einem abnehmbaren Einkaufskorb und einem Tablett. Für kurze Pausen bietet der Rollator einen Sitz. Der Rollator ist faltbar. Dadurch ist er handlich und platzsparend bei Reisen und Ausflügen.

Lieferungskontrolle

Der Rollator wird vom Fachhändler gemäß Ihrem persönlichen Körpermaß geliefert. Ihr Fachhändler hat eine Lieferungskontrolle durchgeführt. Wir empfehlen Ihnen diese Lieferung wie folgt zu prüfen:

Lieferumfang:

- Rollator
- Korb (abnehmbar)
- Tablett
- Gebrauchsanweisung

Bitte kontaktieren Sie bei Lieferdifferenzen Ihren Fachhändler.

Inhalt

Produktbeschreibung.....	Seite 2
Inhalt	Seite 3
Rollator.....	Seite 4
Installation.....	Seite 5
Entfalten.....	Seite 5
Falten.....	Seite 6
Höheneinstellung.....	Seite 6
Bremsfunktion.....	Seite 7
Tablett.....	Seite 8
Einkaufskorb.....	Seite 8
Sitzen.....	Seite 8
Aufbewahrung und Transport.....	Seite 9
Ratschlag zur Sicherheit.....	Seite 9
Reinigung und Wartung.....	Seite 10
Technische Eigenschaften.....	Seite 11
Garantie.....	Seite 11

Rollator

1. Sitz
2. Schiebegriff mit anatomischem Handgriff und Bremshebel
3. Faltsicherung (rot)
4. Querstrebe
5. Hinterrad
6. Vorderrad lenkend
7. Gepäckgestell
8. Feststellhebel für Höheneinstellung



Installation

Entfernen Sie folgende Teile, die als Transportschutz gedient haben:

- zwei Kartonrohre zwischen den Hinterrädern
- Kunststoffstöpsel an den Rohrenden, in die die Schiebegriffe eingeführt werden
- Schutzfolie um die Reifen
- Kartonprotektor zwischen Vorder- und Hinterrahmen

Führen Sie die Schiebegriffe mindestens 9 cm tief (bis zur Markierung) in das Rohr des Fahrgestells ein (siehe Abb. 1). Ziehen Sie den Feststellhebel im Uhrzeigersinn fest an.



Abb. 1

Hinweis: Der Feststellhebel muss senkrecht nach unten zeigen. Um den Feststellhebel nach unten zu drehen ziehen Sie diesen heraus, und drehen Sie diesen, so dass das Ende des Feststellhebels nach unten zeigt. Die Feststellwirkung des Feststellhebels ändert sich hierdurch nicht.

Entfalten

Stellen Sie den Rollator auf die Räder. Durch Ziehen eines der Rohre eines Hinterrades können Sie das Fahrgestell auseinander falten (Abb. 2 Punkt 1), dann drücken Sie die Querstrebe gerade nach unten (Abb. 2 Punkt 2) bis diese leicht einrastet. Drehen Sie die bewegliche Faltsicherung (Abb. 2 Punkt 3) bis zum Anschlag (Abb. 3), so dass diese senkrecht zur Querstrebe steht.



Abb. 2

Abb. 3

Falten

Nehmen Sie den Einkaufskorb und das Tablett ab. Lösen Sie die Bremse. Drehen Sie die Faltsicherung im Uhrzeigersinn, dann ziehen Sie die Querstrebe gerade nach oben (Abb. 2 Punkt 2).

Höheneinstellung

Um den Feststellhebel zu lösen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn. Bringen Sie dann den Schiebegriff in die gewünschte Höhe.

Zu beachten: Die Schiebegriffe müssen mindestens 9 cm tief (oder bis zur Markierung) im Rohr des Fahrgestells sein. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Feststellhebel wieder angezogen. Bringen Sie den zweiten Schiebegriff auf der gleichen Höhe an. Der Feststellhebel muss senkrecht nach unten zeigen. Um den Feststellhebel nach unten zu drehen ziehen Sie diesen heraus, und drehen Sie diesen, so dass das Ende des Feststellhebels nach unten zeigt (Abb.4). Die Feststellwirkung des Feststellhebels ändert sich hierdurch nicht.



Abb. 4

Einstellung Schiebegriffe

Um den Feststellhebel zu lösen, drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.

Zu beachten: Die Schiebegriffe müssen so eingestellt sein, dass der Pfeil oben auf dem Schiebegriff vor dem anatomischen Handgriff gerade in Gehrichtung zeigt (Abb. 5). Wenn die Schiebegriffe nicht gerade in Gehrichtung eingestellt sind (Abb. 6), besteht Kippgefahr.



Abb. 5

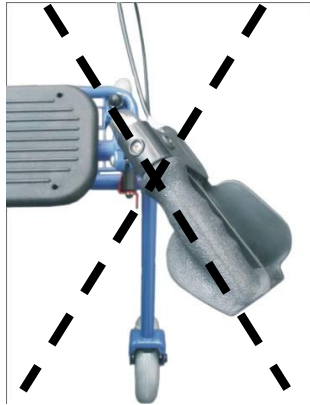


Abb. 6

Bremsfunktion

Zu beachten: Die Bremswirkung kann durch Abnutzung der PU-Reifen beeinträchtigt werden. Prüfen Sie die Bremswirkung der Bremsen regelmäßig!



Abb. 7

Bedienung der Bremsen

- Bremsen: Ziehen Sie beide Bremshebel gleichmäßig und langsam hoch (Abb. 7 Punkt 1)
- Feststellen der Bremse: Drücken Sie die Bremsgriffe herunter, bis sie einrasten (Abb. 7 Punkt 2)
- Bremse entriegeln: Ziehen Sie beide Bremsgriffe gleichmäßig hoch, bis sie entriegelt sind.

Tablett

Das Tablett ist nur für kleine Gegenstände geeignet.

Zu beachten: Keine heißen, schweren oder spitzen. Gegenstände auf dem Tablett ablegen. Das Tablett hat kleine Füßchen. Passen Sie das Tablett mit diesen Füßchen in die Löcher des Sitzes ein.



Abb. 8

Einkaufskorb

Der Einkaufskorb wird an den beiden Haken unter dem Sitz eingehängt.

Zu beachten: Benutzen Sie den Einkaufskorb nur zum Transport von Gegenständen. Überladen Sie den Einkaufskorb nicht!
Max. Zuladung 5 kg.



Abb. 9

Sitzen:

Schieben Sie den Rollator auf ebenen, festen Untergrund und stellen dann die Bremse fest. Stellen Sie sicher, dass die Fallsicherung festgestellt ist und der Rollator stabil steht und nicht rutscht.

Zu beachten: Setzen Sie sich nur aufrecht auf den Sitz. Lehnen Sie sich nicht schräg gegen den Rollator. Entnehmen Sie bitte die richtige Sitzposition dem Bild (Abb. 9).

Der Transport von Personen mit dem Rollator ist verboten! (Abb. 10)



Abb. 10

Nicht über den Rand des Sitzes setzen, da Kippgefahr! (Abb. 11)



Abb. 11

Aufbewahrung und Transport

Nehmen Sie den Einkaufskorb und das Tablett ab. Lösen Sie die Bremse. Drehen Sie die Faltsicherung im Uhrzeigersinn, dann ziehen Sie die Querstrebe gerade nach oben.



Abb. 12 Aufbewahrung



Abb. 13 Transport

Ratschlag zur Sicherheit

Benutzen Sie den Rollator nur, wenn er sich in einwandfreiem Zustand befindet und stellen Sie sicher, dass die Faltsicherung festgestellt ist. Jedes Mal, bevor Sie den Rollator benutzen, prüfen Sie, ob die Faltsicherung richtig arretiert ist, indem sie nach unten zeigt.

Den Rollator nur auf festem und ebenem Untergrund verwenden.

Die Räder könnten sich in Rinnen oder Bodenunebenheiten festsetzen. Machen Sie aus diesem Grunde lieber einen Umweg und vermeiden Sie Hindernisse jeglicher Art.

Halten Sie immer beide Handgriffe. Sie könnten sonst das Gleichgewicht verlieren.

Bremsen Sie immer langsam und gleichmäßig mit beiden Händen zugleich.

Beim Abstellen des Rollators sollte die Feststellbremse immer gesperrt bleiben, um ein evtl. Wegrollen des Rollators zu verhindern.

Die Bremswirkung kann durch Abnutzung der Reifen beeinträchtigt werden. Also prüfen Sie die Bremswirkung der Bremsen regelmäßig.

Es besteht Rutschgefahr auf schmutzigem, nassem, frostigem oder schneebedecktem Untergrund. Die Bremswirkung wird auf solchem Untergrund entsprechend reduziert.

Überladen Sie den Rollator nicht! Die maximale Gepäckzuladung beträgt 5 kg.

Setzen Sie sich nur aufrecht auf den Sitz.

Lehnen Sie sich nicht schräg gegen den Rollator. Die richtige Sitzposition entnehmen Sie bitte der Abbildung 9.

Reinigung und Wartung

Zur Reinigung benutzen Sie bitte lediglich ein angefeuchtetes Tuch und allenfalls milde, nicht aggressive, handelsübliche Reinigungsmittel für den Rahmen und die Räder. Trocknen Sie nach der Reinigung ab. Lassen Sie keine Reinigungsmittel oder Wasser in die Rahmenrohre gelangen.

Prüfen Sie die Reifen regelmäßig. Sie sollten stets in gutem Zustand sein. Die Bremswirkung hängt vom Zustand der Reifen ab.

Achten Sie auf festen Sitz von Schrauben und Muttern und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Zur Einstellung der Bremsen sind die Bremskabel mit verschiedenen Einstellungsschrauben versehen. Eine evtl. Wartung des Rahmens lassen Sie unbedingt nur von Ihrem Fachhändler ausführen. Um Unfälle durch aufgetretenen Verschleiß zu verhindern, lassen Sie Ihren Rollator in regelmäßigen Abständen von Ihrem Fachhändler warten. Er wird eventuellen Verschleiß feststellen, die betreffenden Teile austauschen und die Wartung vornehmen.

Technische Eigenschaften

Breite:	61 cm	Faltmaß:	86 x 61 x 26 cm
Länge:	67 cm	Reifen:	190 x 50 mm
Sitzhöhe:	61 cm	Max. Gepäckzuladung:	5 kg
Höhe (verstellbar):	79 bis 95 cm	Max. Traglast:	130 kg
		Eigengewicht:	10,8 kg

Garantie

Die Garantiezeit für den Rollator beträgt 24 Monate und schließt Material- und Produktionsfehler ein. Nicht durch die Garantie abgedeckt sind Verschleißteile und Beschädigungen welche aus unsachgemäßer Behandlung, übermäßigem Gebrauch, gewaltsame Beschädigungen oder nicht autorisierten Änderungen oder Reparaturen resultieren. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Für Ihre Sicherheit und bezüglich der Produkthaftung des Herstellers, können Änderungen am Rollator nur im Rahmen des Modulsystems vorgenommen werden. Es sind nur Originalersatzteile zu verwenden.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

Stand: 06/2008

Fachhändler:



Drive Medical GmbH & Co. KG
Leutkircher Straße 44
D-88316 Isny/Allgäu
www.drivemedical.de